



C2 系列

智能护理呼叫信息系统

产品施工安装指导书




目 录

一、 系统连接示意说明	3
二、 产品及安装说明	4
1. 床头分机 (型号 : HGCT-C2)	4
2. 门口分机 (型号 : HGMK-C2)	6
3. 卫浴分机 (型号 : HGWY-T0)	8
4. 医护分机 (型号 : HGYH-C2)	8
5. 走廊显示屏 (型号 : HGZL-T0)	10
三、 设备连线说明	10
1. 门口分机连接卫浴分机 (同床头)	10
2. 床头分机连接门灯	11
3. 走廊屏接线方法	11

一、系统连接示意说明



1. C2系列产品为点对点布线方式；
2. 单个支路最长距离（从交换机到最远的设备）不得超过80m；
3. 走廊屏用RVV2*1.5电源线供电，每根电源线上连接的走廊屏数量不得超过3个；
4. 任选POE或者集中供电方式供电。

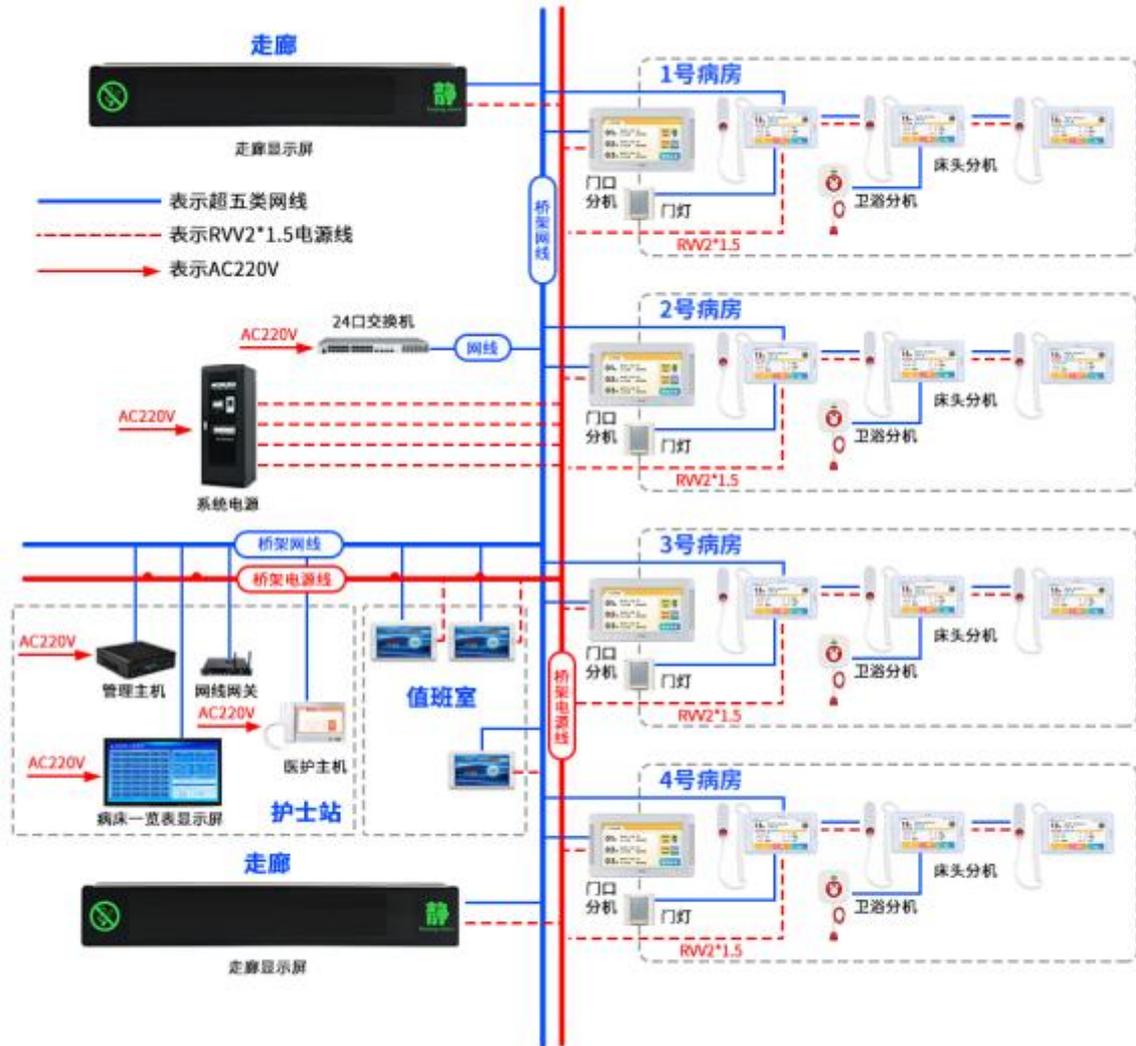

二、产品及安装说明

1. 床头分机 (型号: HGCT-C)

(1) 产品尺寸 (单位: mm) 及背面引线说明

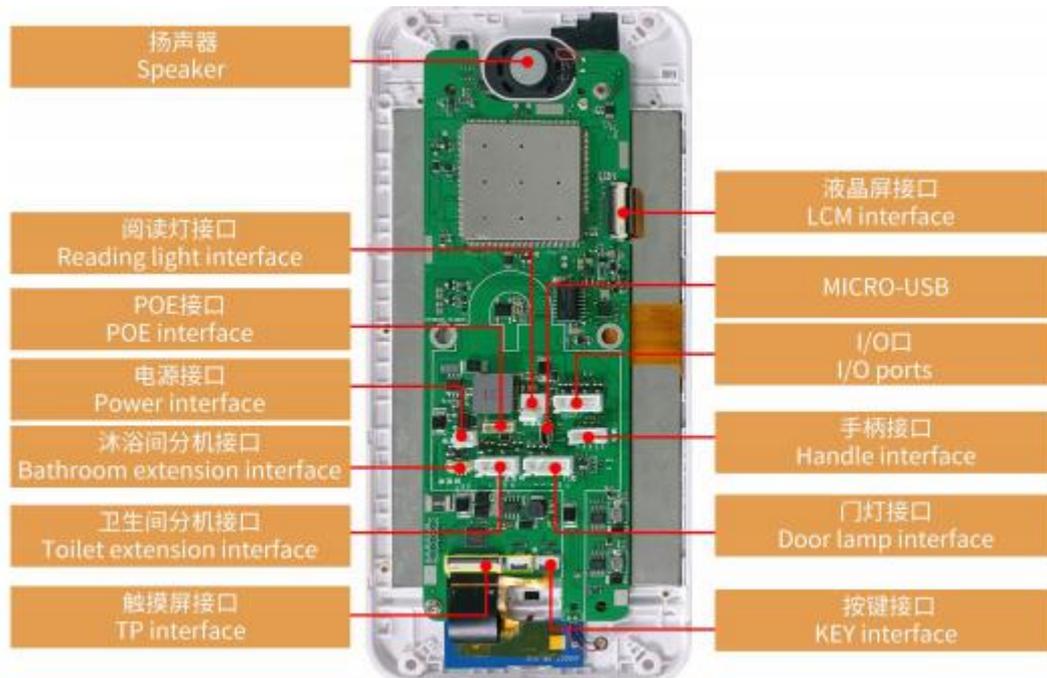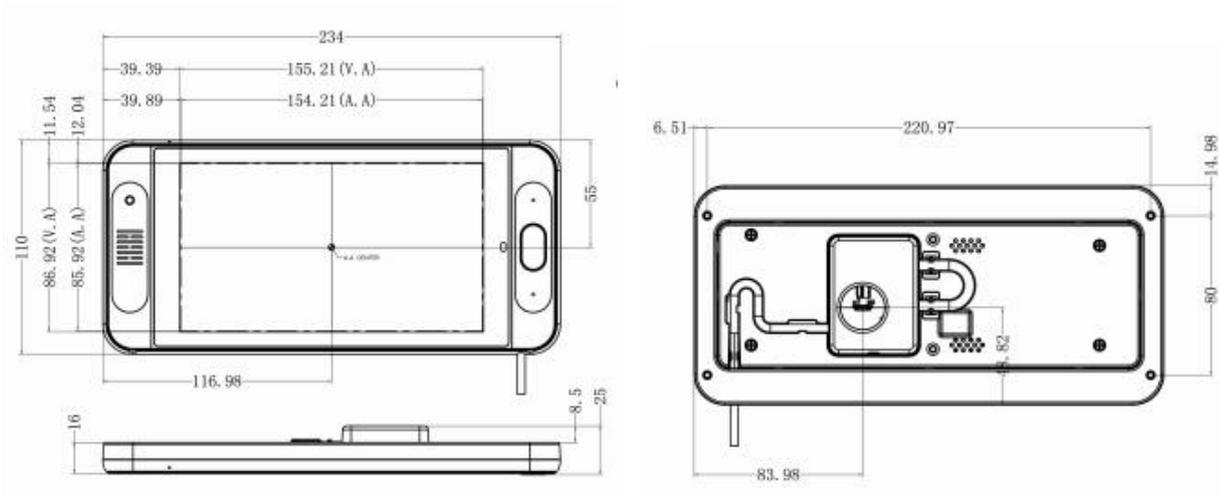

(2) 床头分机安装方式 (嵌入式或明装式) 及位置




安装位置参考示意图




红色区域为床头分机螺钉固定孔



ST2.9*10/30
盘头自攻螺钉

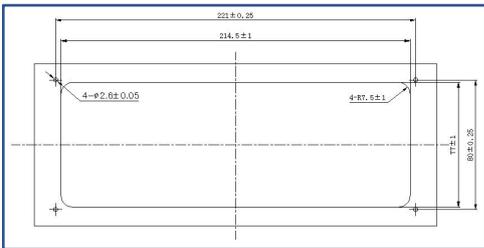

嵌入式安装开孔示意图

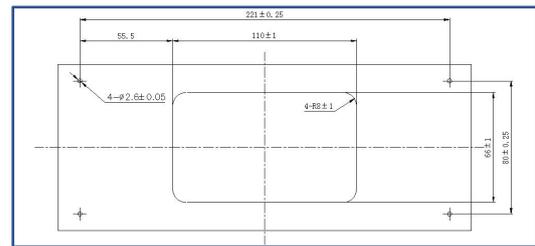

明装式安装开孔示意图



嵌入式安装后视图
(分机主体扣到设备带上用螺钉固定)




明装式安装后视图
(用自攻螺钉直接固定在设备带上)

(3) 手持分机 (型号: HGSC-C) 支架安装



尺寸图

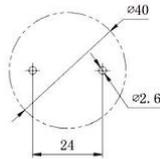

开孔示意图




螺钉固定孔



ST2.9*8盘头自攻螺钉



(4) 接线说明

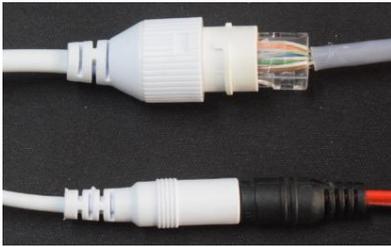


集中供电连接



POE 供电连接

2. 门口分机 (型号: HGМК-C)

(1) 产品尺寸 (单位: mm) 及背面引线说明

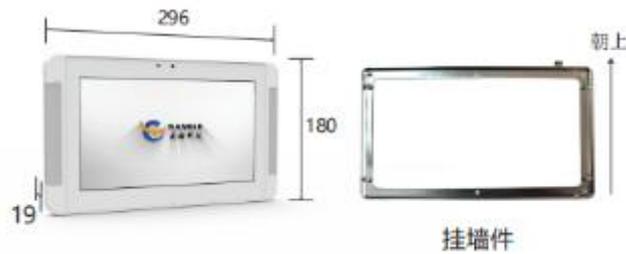

挂墙件

(2) 接线说明



集中供电



POE 供电

(3) 门口分机安装方式及位置







3. 卫浴分机 (型号 : HGWY)

(1) 产品尺寸 (单位 : mm) 及背面引线



(2) 卫浴分机安装方式及位置

- 1、卫浴分机一般在坐便器或浴室的一侧。
- 2、坐便器预留 86 底盒建议离地高 800mm。
- 3、蹲便器预留 86 底盒建议离地高 500mm。
- 4、卫浴分机预留 86 底盒建议离地高 2000mm。
- 5、吊坠距地面距离 200-300mm。
- 6、卫生间分机安装位置需远离喷撒区域。

4. 医护分机 (型号 : HGYH-C)

(1) 产品尺寸 (单位 : mm) 及背面引线说明



POE 供电接口




集中供电接口

(2) 医护分机安装方式及位置



(3) 挂墙开孔示意图

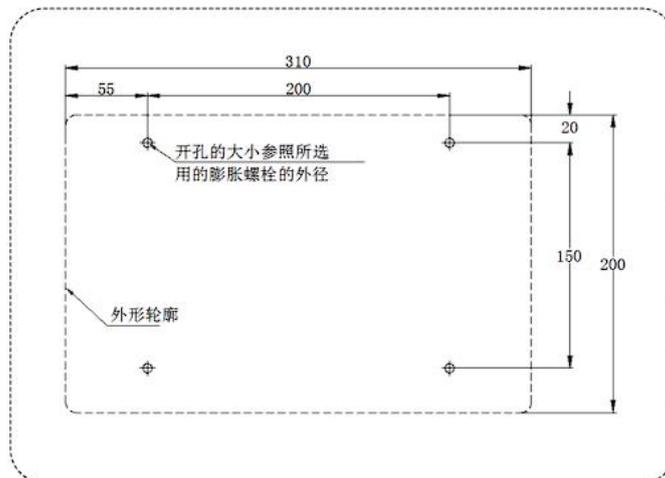


(4) 接线示意




5. 走廊显示屏 (型号: HGHX-T)

(1) 产品尺寸及背面引线说明

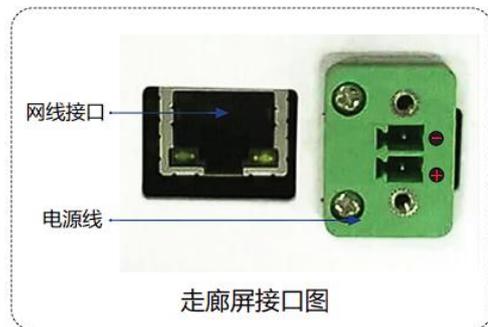


(2) 安装方式及位置

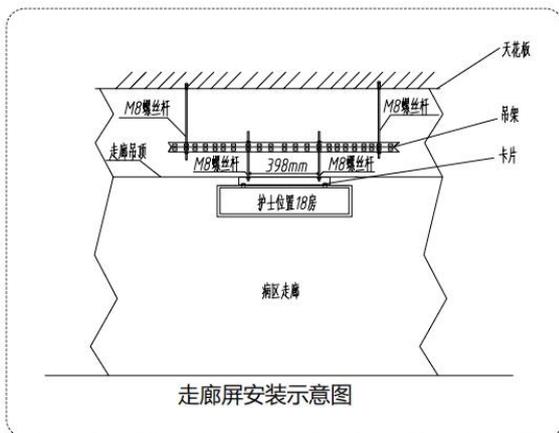


三、设备连线说明

1. 门口分机连接卫浴分机 (同床头)

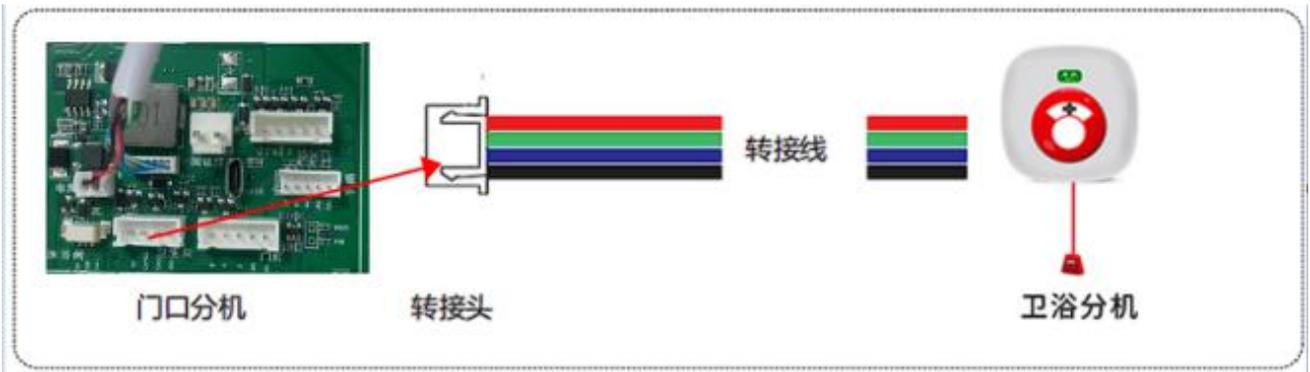

转接头为 4PIN 接头，转接线一般采用网线，连接线颜色一一对应即可。

2. 床头分机连接门灯

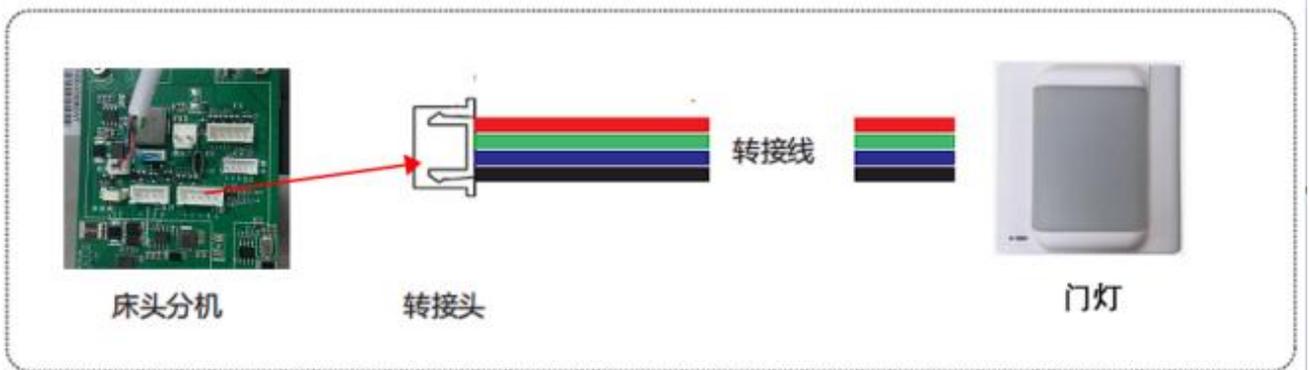

转接头为 5PIN 接头，转接线一般采用网线，连接线颜色一一对应即可

3. 走廊屏接线方法

